

Notfallbeatmung mit dem OXYLATOR®

OXYLATOR® FR-300 Anwendung



Nach dem Öffnen der Sauerstoffflasche, den Bedienknopf des OXYLATOR® drücken und eine ¼ Umdrehung nach rechts drehen.



Maske dicht aufsetzen und mit Doppel-C-Griff oder Esmarch-Handgriff fest andrücken.



Bei dichtem Maskensitz beginnt der Beatmungszyklus. Der OXYLATOR® passt sich automatisch der Lunge an.

Rhythmisches Klacken oder Schnorren des OXYLATOR® bedeutet ungenügende Kopfüberstreckung oder Atemwegsverlegung.



Manuelle Beatmung mit dem OXYLATOR® durch Drücken und Entlasten des Bedienknopfes.

Eine Sekunde drücken des Bedienknopfes entspricht 500 ml Sauerstoffbeatmung.