



Training mit dem OXYLATOR®

Um in Notfallsituationen richtig und sicher zu handeln ist regelmäßiges Training von entscheidender Bedeutung.

Da der OXYLATOR® rein mit Sauerstoff betrieben wird, ist eine regelmäßige Schulung nur mit der Sauerstoffflasche möglich und daher auf die Dauer sehr kostenintensiv. Dies birgt die Gefahr, dass das Beatmungstraining mit dem OXYLATOR® zu kurz kommt.

Aus diesem Grund haben wir für Sie eine kostengünstige und auch sehr sichere Alternative entwickelt.

Einen Adapter mit integrierten Druckminderer zum Anschluss des OXYLATOR® an einen Pressluftatmer.

Mit diesem Trainingsadapter, haben Sie die Möglichkeit jederzeit sicher, lange und kostengünstig mit dem OXYLATOR® an Phantomen zu trainieren. Sie können regelmäßig die Funktionen an der Testlung prüfen und demonstrieren, oder sich gegenseitig beatmen, um auch die assistierte Beatmung zu üben.



PANOMED MEDIZINTECHNIK
HAUPTSTR.57, 82234 WESSLING

pan-o-med
medizintechnik

OXYLATOR®

Trainingsadapter
für
Pressluftatmer





OXYLATOR® TRAININGSADAPTER

Technische Beschreibung

Der OXYLATOR® Trainingsadapter wird einfach an den Euroanschluss der Mitteldruckleitung des Lungenautomaten angekuppelt. An der anderen Seite befindet sich eine Rectuskupplung zum Anschluss des OXYLATOR®.


Zwischen den beiden Anschlüssen ist ein Druckminderer eingebaut, der den relativ hohen Mitteldruck des Pressluftatmers (ca. 7 bar) auf sichere 5 bar reduziert. Somit wird der OXYLATOR® vor zu hohem Druck geschützt.

Trainingszeiten:

Flaschen- volumen	Fülldruck/ Atemluft- menge	Trainings- zeit ¹
2 x 4 Liter	200 bar/1600 Liter	~ 160 min
1 x 6 Liter	300 bar/ 1636 Liter ²	~ 160 min
Praktische Trainingszeit bei Restdruck in den Flaschen		~ 2 Stunden, 30 Minuten

¹Trainingszeit ergibt sich aus einem durchschnittlichen Atemminutenvolumen mit dem OXYLATOR® von 10l/min.

²4 l/200 bar bzw. 6l/300 bar Fülldruck unterscheiden sich nur unwesentlich aufgrund des Korrekturfaktors bei Erhöhung des Fülldrucks.

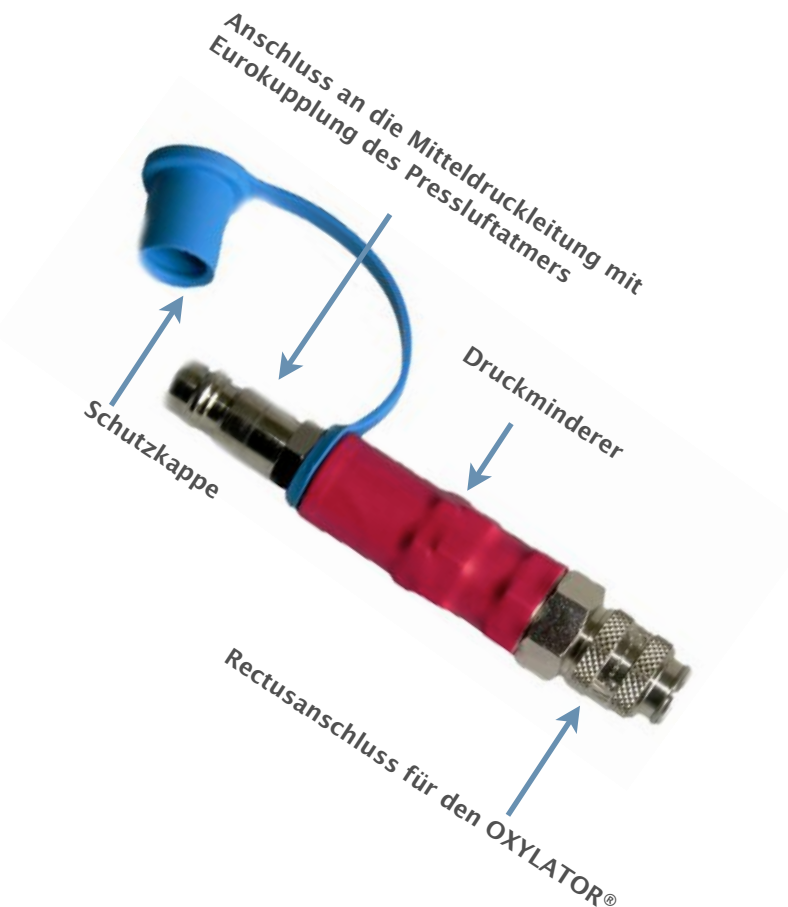

Preis

Trainingsadapter für
OXYLATOR®-Anschluss
an einen Pressluftatmer

179 Euro
zzgl MwSt.

Kontaktadresse

Panomed Medizintechnik

Hauptstr. 57
82234 Weßling

T: 08153-95 28 18
F: 08153-95 28 17

Email: info@panomed.de
Internet: www.panomed.de

pan-o-med
medizintechnik